



Välkommen!

En föreläsning om
Klockor & timers

iris
hjälpmede



Åsa Lodin
asa@irishjalpmedel.se



Benjamin Ferm
benjamin@irishjalpmedel.se

Vi spelar in för publicering YouTube



- 0:00 Intro
- 03:12 Allmänt om punktskrift
- 07:10 Klossen
- 09:05 Perkins
- 14:59 Reglett
- 16:33 Papper för punktskrift
- 18:22 Märka med punktskrift
- 23:14 Ritmuff och muffbräde
- 26:59 Svällpapper
- 29:26 Almanackor
- 31:19 Övrigt med punkt/taktil märkning .
- 35:32 Spel
- 40:31 Avslutning



Armbandsur

Handeln



Bildtext: ett armbandsur med vit urtavla och svarta siffror och visare

Armbandsur - kontrast!

Bildtext: ett armbandsur med svart urtavla och vita siffror och visare



Armbandsur



- ▶ Analog eller digital tidsuppläsning på talande. Inleder med dag.
- ▶ Stänga av de talande - håll inne talknappen
- ▶ Levereras med kronan utdragen (spara batteri)
- ▶ Batteri - urmakare eller Iris Hjälpmedel ca 250 kr
- ▶ Armband - urmakare
- ▶ Visa hur man ställer
- ▶ Taktila - ställ medurs (aldrig ”bakåt”)
- ▶ Olika taktila - vassa, runda, mjuka etc

Talande Armbandsur Diana

Talande - 2 storlekar 33/37 mm

Engelsktalande

Diana 10;

Svenska/grundinställning med kan också enkelt ställas om till norska, danska, finska, engelska, franska, tyska, spanska, italienska och holländska.

Välj mellan analog/digital tidsangivelse

Stäng av genom att hålla knappen inne och starta på samma sätt. Sparar batteri.




Armbandsur Diana touch

Diana touch - svart urtavla

Tryck mitt på glaset - eller på
talknappen

Bra för personer med dålig känsel i
fingrarna (ex personer med diabetes)

Diana har 1 batteri - byt hos urmakare

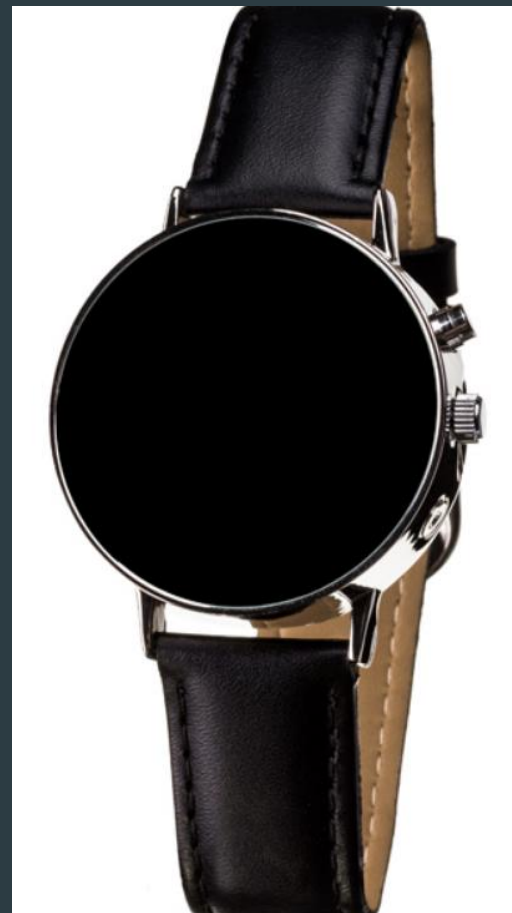

Montiel

- ▶ Schweiziskt ur
- ▶ 2 storlekar 33/40 mm
- ▶ Metallarmband, elastiskt
- ▶ Mycket distinkta punkter
- ▶ Alt. 33 mm /läderarmband





Arsa - nyhet

- ▶ 2 storlekar 34mm
- ▶ Metallarmband, läder
- ▶ Mycket distinkta reliefmärkta kvartar och små cirklar på övriga timmar
- ▶ Svart boett



- Armbandsur - övriga från Arsa
- olika modeller
 - ofta 2 olika storlekar
 - rektangulär
 - blå urtavla relief, blått armband



Bradley - en kul klocka

- ▶ Visare av kulor
- ▶ Magnet
- ▶ Många olika färger, och olika typer av armband
- ▶ Går inte att ställa om av misstag om man är lite hårdhänt...
- ▶ Film

Skötsel



Download from
Dreamstime.com

This watermarked sample image is for previewing purposes only.

ID 40089469

Andrey Burmakin | Dreamstime.com

Talande Väckarur

- ▶ Analog eller digital tidsuppläsning
- ▶ 2 volymlägen - tejpa över högtalaren om för hög volym!
- ▶ Finns också med vibrationslarm



Fickur Klara

- ▶ Volymkontroll
- ▶ Taktil
- ▶ Välj digital eller analog tid
- ▶ Håll inne och hör dag också
- ▶ Skruvmejsel



<ul style="list-style-type: none"> • 1 knapp för tidsangivelse • 1 knapp för inställning av tid • Volymreglage (på sidan) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 knapp för tidsangivelse. • 4 knappar för inställning av tid (på baksidan) • Volymreglage (på sidan) • 2 ingångar för kontaktstyrning/hörsnäcka (på sidan) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 knapp för tidsangivelse • 2 knappar för inställning av tid resp larm • 2 knappar för volymreglering 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 knapp för tidsangivelse • 2 knappar för inställningar av tid resp larm • 2 knappar för volymreglering • Omkopplare inuti för larm av/på och analog/digital tidsangivelse. (Lev. analog och larm av)
Tidsangivelser: <ul style="list-style-type: none"> • Analog tidsangivelse • Veckodag • Dygnsangivelse • Datum och Månad • Automatisk omkoppling sommar-/vintertid <p>"Klockan är kvart över två, tisdag, natt"(analogt)</p>	Tidsangivelser: <ul style="list-style-type: none"> • Analog eller digital tidsangivelse • Veckodag • Dygnsangivelse vid analog inställning <p>"Klockan är kvart över två, tisdag eftermiddag" (analogt) "Klockan är fjorton och femton, tisdag" (digitalt)</p>	Tidsangivelser: <ul style="list-style-type: none"> • Analog tidsangivelse <p>"Klockan är kvart över två, torsdag, natt"(analogt)</p>	Tidsangivelser: <ul style="list-style-type: none"> • Analog eller digital tidsangivelse • Veckodag • Dygnsangivelse • Datum och Månad <p>"Klockan är kvart över två, tisdag, eftermiddag"(analogt) "Klockan är fjorton och femton" (digitalt)</p>
Funktioner/tillbehör: <ul style="list-style-type: none"> • Valbar automatisk timrapportering mellan 9 och 21 • Batterivarning via tal • Halsrem 	Funktioner/tillbehör: <ul style="list-style-type: none"> • Magnetisk baksida för fäste på tex kylskåp • Halsrem • Märkdutt medföljer för upphöjning av tidsangivelseknapp 	Funktioner/tillbehör:: <ul style="list-style-type: none"> • Påminnelser om 10 dagliga rutiner som tex väckning, måltider, vila • Ljudlarm i form av 3 larmsignaler följt av tidsangivelse. Repetition efter 25 sekunder och sedan ytterligare 25 sekunder. • Vid vibrationslarm vibrerar klockan 5 ggr i snabb följd i tre omgångar och är då ljudlös • Batterivarning via tal 	Funktioner/tillbehör: <ul style="list-style-type: none"> • Påminner om en daglig rutin som tex väckning • Ljudlarm i form av 3 larmsignaler följt av tidsangivelse. Repetition efter 1 minut och sedan ytterligare 4 minuter. • Stängs automatiskt av efter 3 larm • Observera att Tida talar digitalt vid inställning av larm • Batterivarning via tal • Halsrem

Fickur - talande. Matris visar skillnaderna

Fickur MyTime

- ▶ Volymkontroll
- ▶ Märkdutt för att förtydliga knapp
- ▶ Välj digital eller analog tid
- ▶ Finns även engelsktalande
- ▶ Snäpplucka/batteri





Timers

elektronisk, taktil, talande

Dövblind

- ▶ Taktill “rova”
- ▶ Vibration - Helen (timer, larm också tal för inställning)



Timglas - Timeflex/Carina



Hur lång tid är en kvart???

Garanti



- ▶ 1 år
- ▶ Viktigt att meddela oss om du inte är nöjd!

Vill du ha presentationen med länkar?

Vi publicerar på hemsidan irishjalpmedel.se efter föreläsningen
samt i chatten i Teamsmötet

Våra [webbinarier](#) finns på YouTube

SYNkunskap.se

« Alla Evenemang

Märka och söka

juni 8 @ 14:00 - 14:30

Nästa
föreläsning
med oss den
8 juni



Tack för att ni har lyssnat!

info@irishjalpmedel.se

08-39 94 00